

Окутиарз® краплі очні Ocutears®

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Окутиарз® відтворює дію природної сльози, захищає та зволожує поверхню ока та змашує її. Цей засіб чинить довготривалу полегшуючу дію при сухості очей, що обумовлена:

- сухим кератокон'юнктивітом (синдромом Шегрена);
- пошкодженнями рогівки, ерозією або хірургічними втручаннями на рогівці;
- носінням контактних лінз;
- зміною гормонального фону (менопаузою);
- факторами навколишнього середовища: вітром, холодом, пилом, димом, сухим або забрудненим повітрям;
- роботою за монітором комп'ютера, довгою їздою на автомобілі, перельотами на далекі відстані;
- плаванням в хлорованій воді.

2. СКЛАД

Окутиарз® є стерильний, в'язкопружний, прозорий захисний засіб для рогівки, що не містить консервантів.

Окутиарз® містить: натрієва сіль гіалуронової кислоти 0,15%, натрія хлорид, натрія гідрофосфат, натрія дигідрофосфат, марганцю хлориду тетрагідрат, хлористоводнева кислота/натрія гідроксид до рН 6,8-7,6, вода очищена.


Кожна упаковка Окутиарз® містить 10 мл стерильного розчину.

3. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ

- Не застосовуйте Окутиарз®, якщо у Вас є алергія на будь-які компоненти, що входять до його складу.
- Не використовувати, якщо захисне кільце або флакон пошкоджені.
- Уникати контакту кінчика флакона з оком.
- Щоб уникнути ризику забруднення розчину, уникати контакту кінчика флакона з іншими поверхнями або руками.
- Не використовувати одночасно з іншими очними препаратами місцевого застосування. При застосуванні інших очних крапель, слід почекати принаймні п'ять хвилин, перш ніж закапувати Окутиарз®.
- Не застосовувати при інфекційному ураженні очей.
- Дату першого відкриття вкажіть на флаконі.

4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Перед першим застосуванням видаліть з ковпачка захисне кільце, потягнувши за клапан, що відгинається. Після першого розкриття флакону Окутиарз® можна застосовувати протягом 6 місяців.	Зніміть захисний ковпачок.	Натискаючи на флакон з обох боків, закачайте по одній краплі в обидва ока або на контактні лінзи.	Закрийте флакон захисним ковпачком.
---	----------------------------	---	-------------------------------------

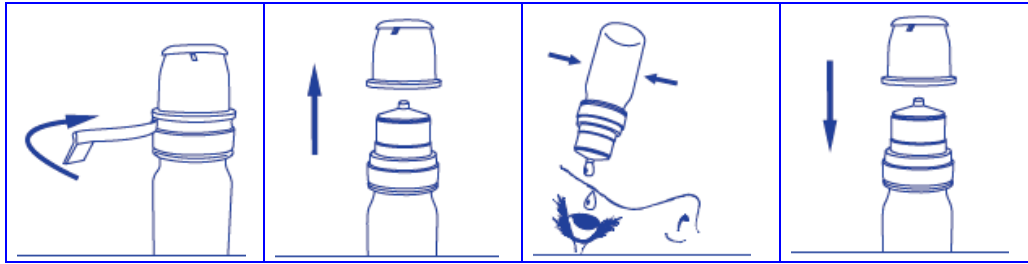

Після закапування легкий масаж повік при закритих очах допоможе швидше розподілити продукт по поверхні очей.

5. ПОБІЧНІ ДІЇ

Як і у випадку застосування інших очних крапель, можливе виникнення слабого тимчасового дискомфорту, пов'язаного з інстиляцією продукту.

ЯКЩО ВИ ПОМІТИЛИ ЯКІ-НЕБУДЬ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ, ЩО НЕ ВКАЗАНІ В ЦЬЙ ІНСТРУКЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВАШОГО ЛІКАРЯ.

6. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Зберігати при температурі від 2 до 25 °С. Не заморозувати.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не застосовувати більше 6 місяців після першого розкриття флакону. Через 6 місяців після першого розкриття флакон слід викинути разом із побутовим сміттям.

Власник ЄС Сертифікату в Європі

i.com medical GmbH, Kaflerstrasse 15, 81241 Munchen, Germany

Виробник

i.com medical GmbH

Kaflerstrasse 15, 81241 Munchen, Germany

на заводі:

Laboratoires Pharmaster

Z.I. de Krafft, 67150 Erstein, France.

Дистриб'ютор

Santen Oy, 33720 Tampere, Finland.